

キーラー サージカルルーペ

各種フレーム・ヘッドバンド

ルーペ (はね上げ式・TTL)

LEDライト



目次

| | | ページ |
|----------------------|--------------------------------------|-----|
| キーラールーペ | 全4種 | 2 |
| レンズキャップ | 度無しレンズキャップ | 3 |
| | ディオプターレンズ (作業距離の変更が可能) | 3 |
| | 作業距離と身長との目安 | 3 |
| ルーペ倍率と視野のイメージ | | 3 |
| フレーム | ワイナビュー® エアーフレーム (はね上げ式) | 4 |
| | ワイナビュー® エアーフレーム TTL (埋め込み式) | 5 |
| | メディビューフレーム (はね上げ式) | 6 |
| | フレーム色見本 | 7 |
| | ワイナビュー ヘッドバンド | 8 |
| | プレートルーペ | 8 |
| LEDライト | ワイナー ファイブ (MODEL : YNA-V-100) | 9 |
| | ワイナー ツー (絞り付き) (MODEL : YNA-IIS-4.5) | 9 |
| | ワイナー ツー (絞り無し) (MODEL : YNA-II-4.5) | 9 |
| | ワイナー ミニ ツー (MODEL : YNA-MINI II) | 10 |
| | キーラーK-LEDライト (シングル・ダブル) | 10 |
| | コードレスLEDライト マエストロ (MODEL : KM-I) | 11 |
| ルーペのフィッティング | | 12 |
| ヒンジからのルーペの外し方 | | 13 |
| シールドの外し方 | ワイナビュー® エアーフレーム・メディビューフレーム | 13 |
| 各種LEDライトの選択 | | 14 |
| LEDライトの接続 | | 14 |

キーラールーペ

各ルーペに度無しレンズキャップ付属

(G) ガリレアン

- 眼へのポジショニングが簡単に行え、初心者から上級者まで幅広く対応できるルーペ。
- 明るい観察像と深い焦点深度。眼に負担をかけません。



(GM) ガリレアンミニ

- 軽量な小レンズ径ルーペながら十分な視野径。
- TTLフレームとの組合せで超軽量。



(SPG) スーパーガリレアン

- 視野中心から周辺まで明るく鮮明な観察像が得られます。
- ガリレアン3.0Xと比較して視野が約15%以上広いです。



(PXL) パノラミックXL

- 小型軽量な高倍率・像歪みがなく細部観察に最適。
- 5種類のレンズと精巧なルーフ型プリズムを組み合わせたケプラー式ルーペ。
- よりプロフェッショナルユーズなモデル。



キーラールーペとルーペバー



| 税込価格 | 税抜価格 |
|-----------|-----------|
| 各¥177,100 | 各¥161,000 |

| MODEL | 倍率 | 作業距離 (mm) | 視野直径 (mm) | 重さ (g) |
|--------|------|-----------|-----------|--------|
| G-2034 | 2.0X | 340 | 114 | 41 |
| G-2046 | | 460 | 152 | |
| G-2534 | 2.5X | 340 | 81 | 42 |
| G-2542 | | 420 | 100 | |
| G-2546 | | 460 | 109 | |
| G-2550 | | 500 | 118 | |
| G-3034 | 3.0X | 340 | 59 | 53 |
| G-3042 | | 420 | 71 | |
| G-3046 | | 460 | 77 | |
| G-3050 | | 500 | 83 | |

| 税込価格 | 税抜価格 |
|-----------|-----------|
| 各¥188,100 | 各¥171,000 |

| MODEL | 倍率 | 作業距離 (mm) | 視野直径 (mm) | 重さ (g) |
|---------|------|-----------|-----------|--------|
| GM-2434 | 2.4X | 340 | 110 | 31 |
| GM-2442 | | 420 | 130 | |
| GM-2446 | | 460 | 145 | |
| GM-2534 | 2.5X | 340 | 75 | 33 |
| GM-2542 | | 420 | 95 | |
| GM-2546 | | 460 | 105 | |
| GM-2550 | | 500 | 114 | |

| 税込価格 | 税抜価格 |
|-----------|-----------|
| 各¥248,600 | 各¥226,000 |

| MODEL | 倍率 | 作業距離 (mm) | 視野直径 (mm) | 重さ (g) |
|----------|------|-----------|-----------|--------|
| SPG-3034 | 3.0X | 340 | 68 | 57 |
| SPG-3042 | | 420 | 82 | |
| SPG-3046 | | 460 | 88 | |
| SPG-3050 | | 500 | 95 | |

| 税込価格 | 税抜価格 |
|-----------|-----------|
| 各¥298,100 | 各¥271,000 |

| MODEL | 倍率 | 作業距離 (mm) | 視野直径 (mm) | 重さ (g) |
|----------|------|-----------|-----------|--------|
| PXL-3534 | 3.5X | 340 | 55 | 55 |
| PXL-3542 | | 420 | 71 | |
| PXL-3546 | | 460 | 79 | |
| PXL-3550 | | 500 | 87 | |
| PXL-4534 | 4.5X | 340 | 46 | 60 |
| PXL-4542 | | 420 | 61 | |
| PXL-4546 | | 460 | 69 | |
| PXL-4550 | | 500 | 77 | |

| 税込価格 | 税抜価格 |
|-----------|-----------|
| 各¥320,100 | 各¥291,000 |

| MODEL | 倍率 | 作業距離 (mm) | 視野直径 (mm) | 重さ (g) |
|----------|------|-----------|-----------|--------|
| PXL-5534 | 5.5X | 340 | 35 | 62 |
| PXL-5542 | | 420 | 47 | |
| PXL-5546 | | 460 | 53 | |
| PXL-5550 | | 500 | 60 | |

レンズキャップ

度無しレンズキャップ (各ルーペに付属)



- ・ルーペレンズ本体の表面を保護。
- ・取り外して水洗い可能。

| 税込価格 | 税抜価格 |
|-----------|-----------|
| 各1組¥5,280 | 各1組¥4,800 |

| MODEL | ルーペモデル |
|------------|---------------|
| AP-8022G | G：ガリレアン |
| AP-8022SPG | SPG：スーパーガリレアン |

| MODEL | ルーペモデル |
|-----------|--------------|
| AP-8022GM | GM：ガリレアン ミニ |
| AP-8022P | PXL：パノラミックXL |

ディオプターレンズ (オプション)

- ・作業距離の変更が可能。
プラスレンズは短く、
マイナスレンズは長くなります。
- ・1つのルーペで用途に応じて距離の変更が可能。
- ・全てのルーペに用意しています。

| 税込価格 | 税抜価格 |
|------------|------------|
| 各1組¥13,200 | 各1組¥12,000 |

| キャップに 識別マーク | ディオプター値 | | | | | |
|----------------|---------|-------|-------|------|---------|-------|
| | プラスレンズ | | | 度無し | マイナスレンズ | |
| | ●●● | ●● | ● | なし | ● | ●● |
| | P1.00 | P0.50 | P0.25 | 0.00 | M0.25 | M0.50 |
| | 254 | 291 | 313 | 340 | 372 | 410 |
| | 296 | 347 | 380 | 420 | 469 | 532 |
| | 315 | 374 | 413 | 460 | 520 | 597 |
| | 333 | 400 | 444 | 500 | 571 | 667 |

ディオプターレンズの選択

ルーペモデル と デイオプター値 を

例 G-M0.25

記入して下さい。

ディオプターレンズが特定できます。

作業距離と身長との目安

| 作業距離 (mm) | 340 | 420 | 460 | 500 |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 身長 (cm)との目安 | (165位まで) | (161～172) | (168～180) | (175位以上) |

- ・作業距離は身長・用途・ポジション(座位・立位)等に応じた選択をお勧めします。

ルーペ倍率と視野のイメージ

2.0x




2.4x



2.5x




3.0x

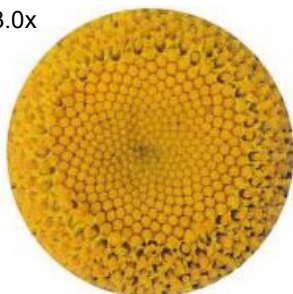


3.5x



4.5x

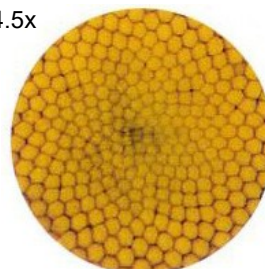

5.5x

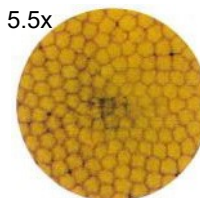


ワイナビュー® エアーフレーム

ワイナビュー® エアーフレーム

新開発の軽量で安定感・フィット感が抜群のフレームです。(重さ26g・フレームのみ)
(フレームカラーは7ページ)

サポートコード

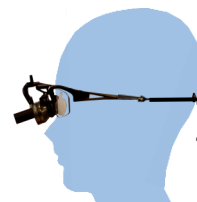

シールド

眼鏡と併用の時には取り外します。
矯正レンズに取り換えることも可能。

シールドの外し方
13ページ

ノーズパッド

パッドの穴の位置でルーペと眼の高さ調整が3段階で可能。

ルーペの高さ調整
12ページ・②

ヒンジ (いずれか選択)

4種類の中からお選びいただけます。

このフレームと各ルーペのセット価格

| | 税込価格 | 税抜価格 |
|---------------------------|----------|----------|
| (G) ガリレアン | ¥242,000 | ¥220,000 |
| (GM) ガリレアン ミニ | ¥253,000 | ¥230,000 |
| (SPG) スーパーガリレアン | ¥313,500 | ¥285,000 |
| (PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X | ¥363,000 | ¥330,000 |
| (PXL) パノラミックXL 5.5X | ¥385,000 | ¥350,000 |

ワイナビュー® エアーフレームと構成品

| MODEL | 商品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|---------|--|----------|----------|
| YFA-SH | ワイナビュー® エアーフレーム シングルヒンジセット (フレームカラー、ノーズパッド選択) | 各¥64,900 | 各¥59,000 |
| YFA-MH | ワイナビュー® エアーフレーム マルチヒンジセット (フレームカラー、ノーズパッド選択) (眼鏡と併用、又はよりルーペ角が必要な場合お勧め。) | | |
| YFA-MSH | マエストロ ワイナビュー® エアーフレーム シングルヒンジセット | | |
| YFA-MMH | LEDライト用 ワイナビュー® エアーフレーム マルチヒンジセット | | |

各セット標準構成品

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------|---------|
| YFA | ワイナビュー エアーフレーム (ヒンジ含まず、フレームのみ) | | ¥30,800 | ¥28,000 |
| ① YVU-NSS ② YVU-NS ③ YVU-NP | ノーズパッド: ① スタンダードパッド (2個1組) ② ソフトスタンダードパッド ③ メガネ併用パッド (2個1組) | | 各¥3,190 | 各¥2,900 |
| YFA-S | ネジ固定式シールド (1組) | | ¥3,080 | ¥2,800 |
| YNA-AM | ブロー用パッド (必要に応じて使用して下さい。) | | ¥660 | ¥600 |
| AP-7099 | サポートコード | | ¥1,650 | ¥1,500 |
| AP-7136 | レンズクロス | | ¥880 | ¥800 |
| MV-C | ケース (LEDライトと購入の場合は、YNA-LED-Cケースが付属します。) | | ¥3,300 | ¥3,000 |

オプション


| | | | | |
|-----------|--|--|---------|---------|
| YF-L | 矯正レンズ (処方箋に基づいて作成代行します。) (ディオプターは-5.50位まで) (実費) | | ¥28,600 | ¥26,000 |
| YNA-LED-C | ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm) | | ¥8,800 | ¥8,000 |

ワイナビュー® エアーフレーム TTL

ワイナビュー® エアーフレーム

新開発の軽量で安定感・フィット感が抜群のフレームです。(重さ26g・フレームのみ)
(フレームカラーは7ページ)

サポートコード

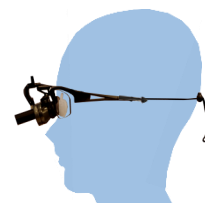


TTL加工済シールド

矯正レンズに取り換えることも可能。

ノーズパッド (高さ調整可)

パッドの穴の位置でルーベと眼の高さ位置調整が3段階で可能。

ルーベの高さ調整
12ページ・②

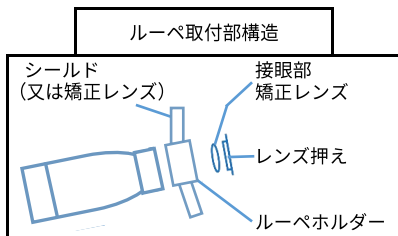

| このフレームと各ルーベのセット価格 | 税込価格 | 税抜価格 |
|---------------------------|----------|----------|
| (G) ガリレアン | ¥249,700 | ¥227,000 |
| (GM) ガリレアンミニ | ¥260,700 | ¥237,000 |
| (SPG) スーパーガリレアン | ¥321,200 | ¥292,000 |
| (PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X | ¥370,700 | ¥337,000 |
| (PXL) パノラミックXL 5.5X | ¥392,700 | ¥357,000 |

ワイナビュー® エアーフレーム T モデル

| MODEL | 商品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|-------|--|----------|----------|
| YFA-T | ワイナビュー® エアーフレーム T モデル (フレームカラー、ノーズパッド選択) | 各¥72,600 | 各¥66,000 |

セット標準構成品

| | | | | |
|-----------------------|--|--|---------|---------|
| YFA | ワイナビュー エアーフレーム (フレームのみ) | | ¥30,800 | ¥28,000 |
| YFA-S-TTL | ネジ固定式TTL加工済シールド (瞳孔距離を指定してください。) (1組) | | ¥28,600 | ¥26,000 |
| ① YVU-NSS ② YVU-NS | ノーズパッド: ① スタンダードパッド (2個1組) or ② ソフト スタンダードパッド (どちらか1つ選択) | | 各¥3,190 | 各¥2,900 |
| YNA-AM | ブロー用パッド (必要に応じて使用して下さい。) | | ¥660 | ¥600 |
| AP-7099 | サポートコード | | ¥1,650 | ¥1,500 |
| AP-7136 | レンズクロス | | ¥880 | ¥800 |
| YNA-T-C | ルーベ単体用ケース 外寸: 170 x 130 x 69(mm) | | ¥8,800 | ¥8,000 |
| YNA-LED-C | ルーベ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm) | | | |

オプション


| | | | | |
|-------|-----------------------------------|--------|---------|---------|
| YFA-L | TTL用矯正レンズ 加工費込み (ディオプターは-5.50位まで) | (実費) | ¥28,600 | ¥26,000 |
| YT-EL | 接眼部矯正レンズ (1組) | (//) | ¥11,000 | ¥10,000 |

メディビューフレーム

メディビューフレーム

ロングセラーを続けるフィット感抜群の
フレーム (重さ55g・フレームのみ)
(フレームカラーは7ページ)

サポートコード

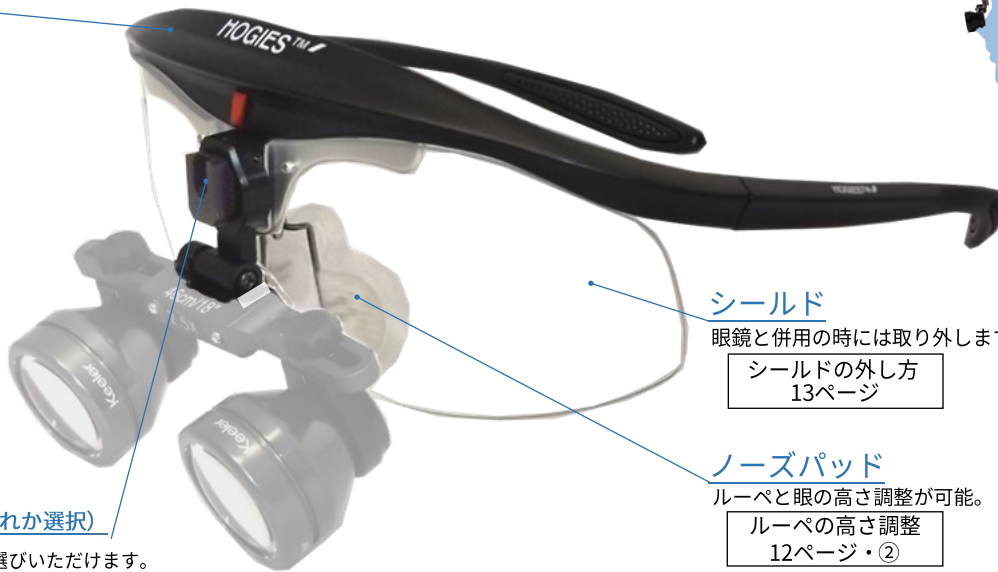

シールド
眼鏡と併用の時には取り外します。
シールドの外し方
13ページ

ノーズパッド
ルーペと眼の高さ調整が可能。
ルーペの高さ調整
12ページ・②

ヒンジ (いずれか選択)

4種類の中からお選びいただけます。

| このフレームと各ルーペのセット価格 | 税込価格 | 税抜価格 |
|---------------------------|----------|----------|
| (G) ガリレアン | ¥242,000 | ¥220,000 |
| (GM) ガリレアン ミニ | ¥253,000 | ¥230,000 |
| (SPG) スーパーガリレアン | ¥313,500 | ¥285,000 |
| (PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X | ¥363,000 | ¥330,000 |
| (PXL) パノラミックXL 5.5X | ¥385,000 | ¥350,000 |

メディビューフレームと構成

| MODEL | 商品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|---|---|----------|----------|
| KMV-F-II | メディビューフレーム セット (フレームカラー、ヒンジ、ノーズパッド各選択) | ¥64,900 | ¥59,000 |
| セット標準構成 | | | |
| KMV | メディビューフレーム (ヒンジ含まず、フレームのみ) | ¥26,400 | ¥24,000 |
| ① KMV-M-S ② KMV-M-M ③ KMV-MM-SH ④ KMV-MM-H | ヒンジ ① マグネットシングル (ルーペの角度を設定出来ます。) ② マグネットマルチ (眼鏡と併用、又はよりルーペ角が必要な場合お勧め。) (どれか1つ選択) ③ マエストロ用マグネットシングル ④ マエストロ用マグネットマルチ | 各¥27,500 | 各¥25,000 |
| ① KMV-NS ② KMV-N-III ③ KMV-N-II | ノーズパッド : ① ソフト スタンダード型 ② メガネ併用型 ③ ハーフムーンメガネ併用型 (どれか1つ選択) | 各¥7,480 | 各¥6,800 |
| KMV-SP | シールド (1枚) (消耗品。年に一度は交換をお勧めします。) | ¥1,650 | ¥1,500 |
| AP-7039 | サポートコード | ¥1,650 | ¥1,500 |
| AP-7136 | レンズクロス | ¥880 | ¥800 |
| MV-C | ケース (LEDライトと購入の場合は、YNA-LED-Cケースが付属します。) | ¥3,300 | ¥3,000 |
| オプション | | | |
| KMV-1.67-L | リムレスレンズ ノーズパッド一体型 | ¥22,000 | ¥20,000 |
| KMV-1.67-R | 同上矯正レンズ (処方箋に基づいて作成代行します。)(実費) | ¥28,600 | ¥26,000 |
| KMV-SP-F | フラットディープシールド (リムレスレンズと併用タイプ) | ¥6,270 | ¥5,700 |
| KMV-B | オデコパッド (取り換え用) | ¥990 | ¥900 |
| YNA-LED-C | ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260x205x90(mm) | ¥8,800 | ¥8,000 |

ワイナビュー® エアーフレーム (全7色)



前枠(黒マット)+テンプル色



メディビューフレーム (全10色)



ワイナビュー® ヘッドバンド




このヘッドバンドと各ループのセット価格

| | 税込価格 | 税抜価格 |
|---------------------------|----------|----------|
| (G) ガリレアン | ¥258,500 | ¥235,000 |
| (GM) ガリレアン ミニ | ¥269,500 | ¥245,000 |
| (SPG) スーパーガリレアン | ¥330,000 | ¥300,000 |
| (PXL) パノラミックXL 3.5X, 4.5X | ¥379,500 | ¥345,000 |
| (PXL) パノラミックXL 5.5X | ¥401,500 | ¥365,000 |

ワイナビュー®ヘッドバンドと構成

| MODEL | 商 品 名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|------------|----------------------------|---------|---------|
| YNA-V- I | ワイナビュー ヘッドバンド セット | ¥81,400 | ¥74,000 |
| セット標準構成 | | | |
| YNA-V-M | ワイナビュー ヘッドバンド (マグネットプレート付) | ¥37,400 | ¥34,000 |
| KMV-M-M | マグネットマルチヒンジ | ¥27,500 | ¥25,000 |
| KMV-N- II | ノーズパッド (ハーフムーンメガネ併用型) | ¥7,480 | ¥6,800 |
| AP-5009-TS | ヘッドバンド用テーブルスタンド (ケース内に収納可) | ¥9,900 | ¥9,000 |
| オプション | | | |
| YN-SLD | ショルダーバッグ型ケース | ¥20,900 | ¥19,000 |

プレートループ

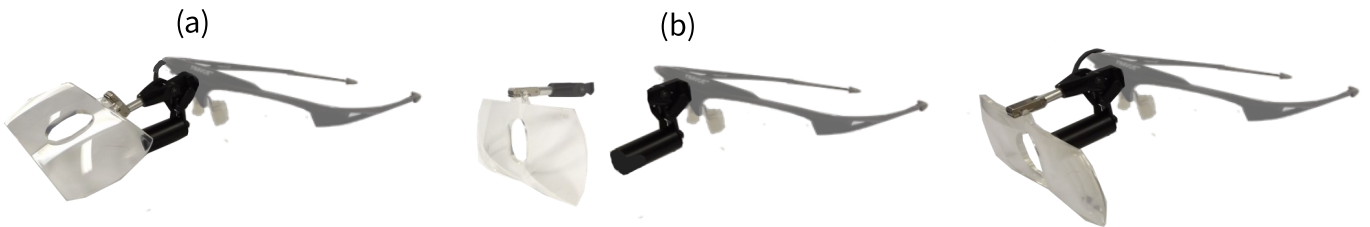

- プレートループはね上げが出来(a)、取り外しも出来ます。(b)
- ループの倍率は1.6Xです。
- 全てのLEDライトと組合せ可能。
- ワイナビュー エアーフレーム か メディビューフレームの選択可能。
- フレームにはスタンダードノーズパッドが付属します。

| MODEL | 商 品 名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|--------------------|---|----------|----------|
| YNVF + YNA-MINI II | ワイナビューエアーフレームに プレートループと YNA-MINI II セット | ¥170,500 | ¥155,000 |
| KMVF+ YNA-MINI II | メディビューフレームに プレートループと YNA-MINI II セット | ¥170,500 | ¥155,000 |
| YNVF | ワイナビューエアーフレームと プレートループセット | ¥66,000 | ¥60,000 |
| KMVF | メディビューフレームと プレートループセット | ¥66,000 | ¥60,000 |
| YNV-1.6 | プレートループ1.6Xアダプタ付 | ¥24,200 | ¥22,000 |
| YNV-P | プレートループ1.6X単体 (穴あけ加工済) | ¥4,950 | ¥4,500 |

LEDライト

ワイナー ファイブ

(MODEL : YNA-V-100)

抜群の明るさ。

ワイナーLEDライトの
フラッグシップモデル



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥47,000(税抜)になります。

| 照度 (ルクス) | 距離 (cm) | スポット サイズ (mm) | 電源 (充電式) | 充電時間 | 光量調整 | 連続使用時間 (最大) | | 本体サイズ (mm) | | 重さ (g) |
|----------|---------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|------------|------|--------|
| | | | | | | 初期→終わり (光量@30cm) | 又は連続可 (100V接続) | 直径 | 長さ | |
| 70,000 | 30 | φ75 | エネルギー4本 固定内蔵 (取り外し不可) | 2時間半 (又は連続) | 3段階調光 (電源コントローラー) | 3時間半 一定 | 又は連続可 (100V接続) | 22.5 | 34.5 | 22 |

| MODEL | 商品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|-----------|---|----------|----------|
| YNA-V-100 | ワイナーV-LEDライトセット (フックアダプター (¥11,000税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む) | ¥273,900 | ¥249,000 |

セット標準構成品

| | | | | |
|---------------|---|--|----------|----------|
| YNA-V-LED 100 | LEDライト・100本体 ライト部重さ: 18g 長さ: 約170cm | | ¥125,400 | ¥114,000 |
| YNA-V-B | バッテリー電源 寸法: 88.5 x 68 x 22(mm) (ツマミ含まず) 重さ: 約170g | | ¥108,900 | ¥99,000 |
| YNA-V-AC-S | 充電アダプター ケーブル付 長さ: 142cm | | ¥17,600 | ¥16,000 |
| YNA-V-C | 保護キャップ | | ¥2,640 | ¥2,400 |
| YNA-LED-C | ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm) | | ¥8,800 | ¥8,000 |

オプション

| | | | | |
|---------|---------------------------------|--|---------|---------|
| YNA-V-S | コード付スイッチ 長さ: 82cm | | ¥14,300 | ¥13,000 |
| YNA-V-D | ディフューザ (照射光を約20%拡散し、約20%減光します。) | | ¥4,290 | ¥3,900 |

ワイナー ツーS (絞り付き)

(MODEL : YNA-IIS-4.5)

光束の絞り付き。

ワイナー ツー (絞り無し)

(MODEL : YNA-II-4.5)

光束の絞り無し。



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥47,000(税抜)になります。

| MODEL | 照度 (ルクス) | 距離 (cm) | スポット サイズ (mm) | 電源 | 光量調整 | | 連続使用時間 (最大) | | 本体サイズ (mm) | | 重さ (g) |
|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------|--------------------|------------|----|--------|
| | | | | | 絞り有り | 2段階調光 (中間スイッチ) | 初期→約10時間後 | 27,000→5,600 (ルクス) | 直径 | 長さ | |
| YNA-IIS-4.5 | 27,000 | 30 | φ30~φ75 | 4.5V (乾電池式) (単三3本) | 絞り有り | 2段階調光 (中間スイッチ) | 初期→約10時間後 | 21 | 36 | 20 | |
| YNA-II-4.5 | | | φ75 | | 絞り無し | | | | | | |

| MODEL | 商品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|---------------|---|----------|----------|
| ① YNA-IIS-4.5 | ワイナーIIS-4.5 LEDライトセット (フックアダプター (¥11,000税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む) | ¥163,900 | ¥149,000 |
| ② YNA-II-4.5 | ワイナーII-4.5 LEDライトセット (フックアダプター (¥11,000税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む) | ¥130,900 | ¥119,000 |

セット標準構成品

| | | | | |
|-------------|--|--|----------|----------|
| ① YNA-II-LA | ワイナーII-S-4.5LEDライト本体 (絞り付き) (中間スイッチ付コード含む) | | ¥123,200 | ¥112,000 |
| ② YNA-II-L | ワイナーII-4.5LEDライト本体 (絞り無し) (中間スイッチ付コード含む) | | ¥90,200 | ¥82,000 |
| YNA-II-BA | バッテリー電源 外寸: 72.5 x 65 x 20(mm) (単三型電池3本使用) | | ¥22,000 | ¥20,000 |
| AP-8022P-1 | 保護キャップ (1個) | | ¥2,640 | ¥2,400 |
| YNA-LED-C | ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm) | | ¥8,800 | ¥8,000 |

オプション

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|------|--------|--------|
| YNA-K-KJ | パナソニック製エネルギー充電器セット (単三型エネルギー8本付) | | (実費) | ¥6,160 | ¥5,600 |
| YNA-YF | イエローフィルター | | | ¥4,290 | ¥3,900 |
| YNA-D | ディフューザ 照射光を約20%拡散し、約20%減光します。 | | | ¥4,290 | ¥3,900 |

ワイナー ミニツ

(MODEL : YNA-MINI II)

超コンパクトな軽量モデル



ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥47,000(税抜)になります。

| 照度 (ルクス) | 距離 (cm) | スポット サイズ (mm) | 電源 | 光量調整 | 連続使用時間 (最大) | | 本体サイズ (mm) | | 重さ (g) |
|----------|---------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------|------------|----|--------|
| | | | | | 初期→終わり(光量@30cm) | 16,000→3,800 (ルクス) | 直径 | 長さ | |
| 16,000 | 30 | φ88 | 4.5V (乾電池式) (単三3本) | 光量調整なし | 初期→約12時間後 | 14.4 | 26.2 | 8 | |

| MODEL | 商品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|-------------|---|----------|---------|
| YNA-MINI II | ワイナーMINI II LEDライトセット (フックアダプター (¥11,000税込) とコード止め (¥1,100税込) 含む) | ¥108,900 | ¥99,000 |

| セット標準構成品 | | | |
|------------------|--|--|-----------------|
| YNA-MINI II -120 | ワイナーMINI II LEDライト本体 (コード長さ: 145cm) | | ¥70,400 ¥64,000 |
| YNA-MINI II -B | バッテリー電源 外寸: 72.5 x 65 x 20(mm) (単三型電池3本使用) | | ¥22,000 ¥20,000 |
| YNA-P-I | 保護キャップ (1個) | | ¥2,640 ¥2,400 |
| YNA-LED-C | ルーペ・LEDライト併用ケース 外寸: 260 x 205 x 90(mm) | | ¥8,800 ¥8,000 |

オプション

| | | | |
|----------|--|--|---------------|
| YNA-P-IY | イエローフィルター | | ¥4,290 ¥3,900 |
| YNA-M-D | ワイナーMINI用ディフューザ 照射光を約20%拡散し、約20%減光します。 | | ¥4,290 ¥3,900 |

キーラー K-LEDライト



(MODEL: 2004-P-1016)

(MODEL: 2004-P-1007)

ライト単独使用の場合、フレーム価格は
¥47,000(税抜)になります。

| 照度 (ルクス) | 距離 (cm) | スポット サイズ (mm) | 電源 (充電式) | 充電時間 | 光量調整 | 連続使用時間 (最大) | | 本体サイズ (mm) | | 重さ (g) |
|----------|---------|------------------|-----------------|------|--------|-------------|----|------------|----|--------|
| | | | | | | 初期→終わり | 一定 | 直径 | 長さ | |
| 28,000 | 30 | φ70 | 7.5Vリチウム イオン | 2時間半 | 連続可変調光 | 約5時間 | 18 | 37 | 16 | |

| MODEL | 商品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|-------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 2004-P-1016 | キーラー K-LEDライト (シングル) (構成部品①②③④⑤) | ¥220,000 | ¥200,000 |
| 2004-P-1007 | キーラー K-LEDライト (ダブル) (構成部品①②X2③④⑥) | ¥297,000 | ¥270,000 |

各セット標準構成品

| | | | |
|---------------|-----------------------|--|-----------------|
| ① 2004-P-5015 | K-LEDライト本体絞り無し | | ¥82,500 ¥75,000 |
| ② 1919-P-5215 | バッテリーパック (光量コントロール付) | | ¥63,800 ¥58,000 |
| ③ EP29-32777 | ACアダプター | | ¥16,500 ¥15,000 |
| ④ K-LED-DC | ディスプレイザブル保護キャップ (5枚入) | | ¥2,750 ¥2,500 |
| ⑤ 1941-P-5385 | シングルチャージャー | | ¥42,900 ¥39,000 |
| ⑥ 1941-P-5350 | ダブルチャージャー | | ¥60,500 ¥55,000 |

オプション

| | | | |
|----------|-----------------------|--|---------------|
| K-LED-Y | イエローフィルター (4枚入) | | ¥4,290 ¥3,900 |
| K-LED-DD | ディスプレイザブルディフューザ (3枚入) | | ¥4,290 ¥3,900 |

コードレス LEDライト マエストロ

(MODEL : KM-I)

新発売

当社各フレームに取り付け可



ワイナビューエアーフレーム取付時



メディビューフレーム取付時

- 軽量・高輝度のコードレスLEDライト
- 照明光は演色性が高く、自然光に近い見え方を実現 (CRI 90+)
- 照明スポットの高い照度均一性、むらのない照明が可能に
- バッテリーの着脱が簡単なワンステップマグネット式



専用ケース

| 主な仕様 | | | |
|-----------------|-----------|------------------|------------------|
| スポットサイズ | (距離35cm時) | Φ 82mm | |
| 照度・3段切替 | | 4,800 lux・ステップ1 | 10,000 lux・ステップ2 |
| 連続使用時間 | | 約3.5時間 | 約2時間 |
| 電源 | | リチウムイオンポリマーバッテリー | |
| LEDの演色性 | | CRI 90以上 | |
| 充電時間 | | 1時間40分 | |
| バッテリー寿命 | | 約500回 | |
| バッテリー大きさ(mm)／重量 | | 50 X 28 X 15／17g | |
| LEDライト重量 | | 14g | |

| MODEL | 商品名 | 税込価格 | 税抜価格 |
|--------|---|----------|----------|
| KM-I | マエストロ LEDライト セット | ¥187,000 | ¥170,000 |
| | セット内容 | | |
| KM-LED | LEDライト | ¥88,000 | ¥80,000 |
| KM-B | 充電式バッテリーパック 1個 (セットには3個付属) | ¥22,000 | ¥20,000 |
| KM-BC | 充電用クレードル (USB電源アダプター・USBケーブル付) 2個同時充電可能 | ¥25,300 | ¥23,000 |
| KM-F | UVキュアリングフィルター (コンポジットフィルター) | ¥6,600 | ¥6,000 |
| KM-CA | 専用ケース | ¥7,700 | ¥7,000 |
| KM-S | ⊕ドライバー | ¥1,100 | ¥1,000 |
| KM-LS | レンズクロス | ¥880 | ¥800 |


| 別売品 | | | |
|-------|----------------------------------|---------|---------|
| YFA-M | マエストロ LEDライト用 ワイナビューエアーフレーム (7色) | ¥51,700 | ¥47,000 |
| KMV-M | マエストロ LEDライト用 メディビューフレーム (10色) | ¥51,700 | ¥47,000 |
| KM-CL | マエストロ LEDライト用 ユニバーサルクリップ | ¥6,600 | ¥6,000 |

ルーペのフィッティング

① 瞳孔距離調整

片眼で物体を観察し、影が見えている場合、その方向へルーペを動かして、影が消えるよう調整します。

もう一方の眼でも同様に行った後、両眼で観察し、左右に影のないことを確認して、ネジを固定します。

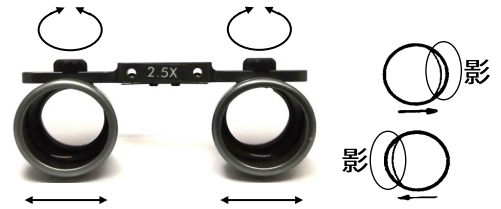

② ルーペの高さ調整


ワイナビューエアーフレーム
4ページ

ワイナビューエアーフレームTTL
5ページ


メディビューフレーム
6ページ

TTL・シングルヒンジルーペ

ノーズパッドの位置で高さ調整が行えます。

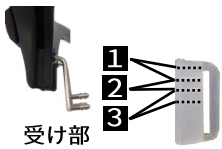


ノーズパッドを下げると上がり、**1**
上げると下がります。**3**

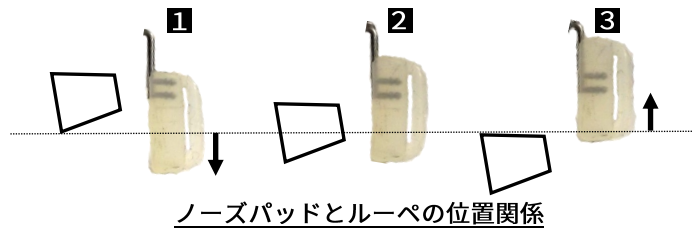


マルチヒンジ

ヒンジの**a**と**b**の曲げ角でも高さ調整が行えます。

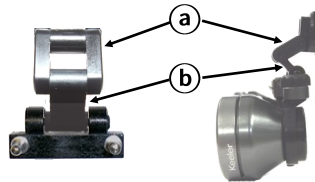


③ ルーペ角度調節

A 回転軸を中心に角度調節が行えます。

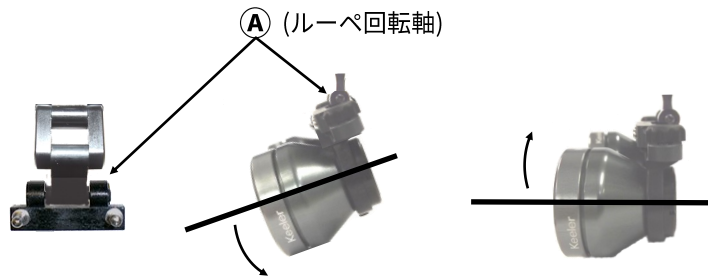


シングルヒンジ


下側の六角ネジ(ストッパー)の長さ調節で行えます。常に同じ位置に戻ります。

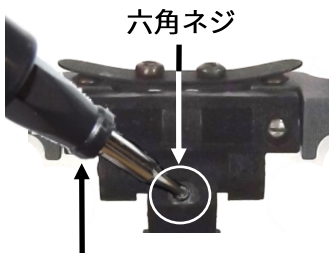

付属六角ドライバー

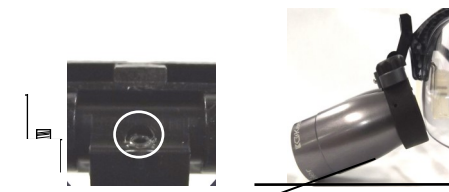

ネジ短め：角度が下方に向きます。

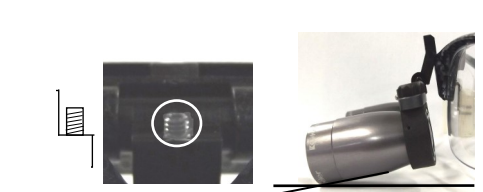

ネジ長め：角度が水平に近づきます。


④ メガネ併用時のノーズパッドの位置

{ヒンジ部は長くし、ノーズパッドを下げた状態 **1** がお勧めです。}

ご使用のメガネレンズ **①** の内側に、

ルーペのノーズパッド **②** を
セットしてください。

① メガネレンズ
② ルーペのノーズパッド
(メガネ併用型)

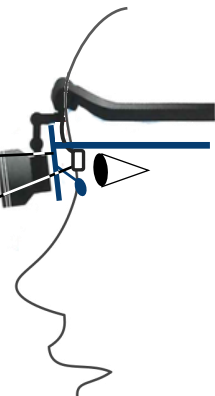

ヒンジからのルーペの外し方

① ヒンジ部を片方の指で押えて、




② ルーペの両端を指先で交互に引いて下さい。



③ ルーペが外れます。



状態によっては非常にタイトな時があります。

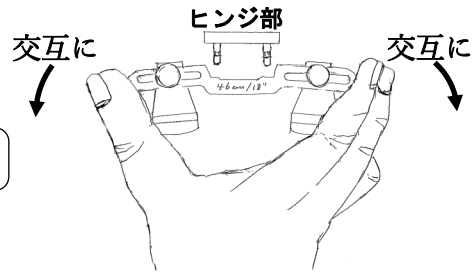

取り付け方

取り外しと逆の手順で取り付けてください。

シールドの外し方

ワイナビュー® エアーフレーム




シールドはネジで固定されています。



ネジを緩めてシールドを外します。
(ネジを抜く必要はありません。)

メディビューフレーム

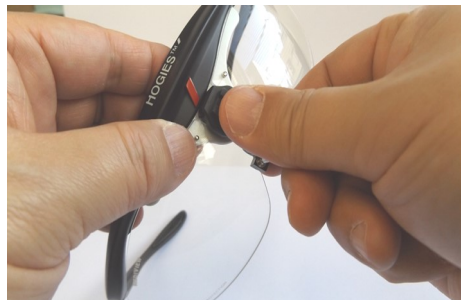

マグネットヒンジを取り外すと簡単に外れます。

各種LEDライトの選択


- ・各種LEDライトを用意しております。(P9～P11)
- ・照度、スポットサイズ等、用途に応じた選択が可能です。
- ・フレームとの接続は各フックアダプターにて接続可能です。

| MODEL | 商品名 | @30cm | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| | | 照度(ルクス) | スポットサイズ(mm) |
| YNA-V-100 | ワイナーV LEDライト (ワイナー ファイブ) | 70,000 | Φ75 |
| YNA-II S-4.5 | ワイナーII S-4.5 LEDライト (ワイナー ツーS) (絞り付き) | 27,000 | Φ35～Φ75 |
| YNA-II-4.5 | ワイナーII-4.5 LEDライト (ワイナー ツー) (絞り無し) | 27,000 | Φ75 |
| YNA-MINI II | ワイナーMINI II LEDライト (ワイナー ミニ ツー) | 16,000 | Φ88 |
| 2004-P-1016 | シングルチャージャー | キーラーK-LEDライト | 28,000 |
| 2004-P-1007 | ダブルチャージャー | | |
| KM-I | コードレスLEDライト マエストロ (@35cm) | 15,500 | Φ82 |


LEDライトの接続

コード付LED用フックアダプター

- ・フレームとの接続はフレーム受部 (a) にフックアダプター (b) を入れます。(図1)
- ・ライトコードはフレームコード止め (c) に止められます。
- ・LEDライトをルーペと同軸に調整可能。

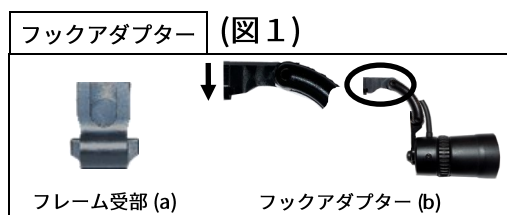

フレーム受部にライトが簡単に接続可能

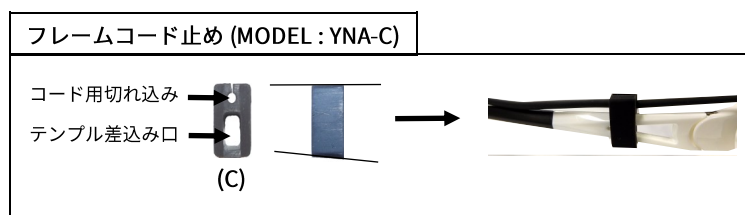

コードを簡単にテンブルに止められます。

マエストロスライドアダプター



ワイナービュー用

| MODEL | 税込価格 | 税抜価格 |
|---------|---------|---------|
| YFA-M-M | ¥15,400 | ¥14,000 |



メディビュー用

| MODEL | 税込価格 | 税抜価格 |
|--------|---------|---------|
| KMV-MH | ¥15,400 | ¥14,000 |

キーラー社サージカルルーペは使用分野を限定しません。

- 神経外科分野の手術に
- 耳、鼻、咽喉の手術に
- 泌尿器科外科手術に
- 周産期手術に
- 胸部外科手術に
- その他繊細な技術の要求されるあらゆる分野に最適のルーペです。



整形外科手術



プラスチック/
外科手術



産婦人科手術



心臓外科手術



歯科手術



眼科手術

届出番号：

13B1X00268000038 (キーラーサージカルルーペ)

13B1X00268000183 (ファイナビュー エアーフレーム)

13B1X00268000039 (メディビューフレーム)

13B1X00268000158 (プレートルーペ)

13B1X00268000184 (ファイナビューヘッドバンド)

13B1X00268000157 (ワイナーV LEDライト)

13B1X00268000112 (ワイナーLEDライト)

13B1X00268000141 (ワイナーMINIⅡLEDライト)

13B1X00268000151 (キーラーK-LEDライト)

13B1X00268000187 (コードレスLEDライト マエストロ)

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

CA-LOUPE-FT-2024

2024.4



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

www.keeler-yna.co.jp

〒113-0033

東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931

e-mail:eigybu@keeler-yna.co.jp

ご用命は…