

新発売

PMフレーム /

PMルーペ・フリップアップ, TTL



ワイナビュー® PMフレーム・PMルーペセット



PMルーペは光路を45度下方向に曲げているため、より自然な姿勢で処置が可能です。

この優れた人間工学に基づいたデザインにより、頸椎・首・背中への負担と同時に目の疲れを軽減します。

・マルチコーティングレンズ

*低分散ガラスレンズへのマルチコーティングにより色収差を防止
400nm~1000nmの広い波長帯域で高い光透過率を実現し、明るく鮮明な画像を実現
(広い波長帯域で屈折率の変化が少なく、色収差を低減)

・高屈折率プリズム

*誘電体コーティングが施されたプリズムにより最も明るい画像を実現
(反射率や透過率等の優れたコーティング)

・度無しレンズキャップ

各ルーペに保護用度無しレンズキャップが付属します。



(PM-8022)

ワイナビュー® PMフレーム・PMルーペセット



| PMルーペ フリップアップ MODEL | 倍率 | PMルーペ TTL MODEL |
|------------------------|------|--------------------|
| YNV-PMB-30P | 3.0X | YNV-PMT-30P |
| YNV-PMB-40P | 4.0X | YNV-PMT-40P |
| YNV-PMB-50P | 5.0X | YNV-PMT-50P |
| YNV-PMB-58P | 5.8X | YNV-PMT-58P |
| YNV-PMB-72P | 7.2X | YNV-PMT-72P |



ルーペの特長

フリップアップ

TTL

| フリップアップ | ルーペの特長 | TTL |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| ルーペの視野を確保の為、矯正レンズの一部のカット(穴空け) | 矯正レンズ | 矯正レンズにルーペホルダー取付 |
| 用途に応じて距離の設定可能 | 作業距離 | 用途に応じて距離の設定可能 |
| 可能 | ルーペの取換え | 可能 |

ルーペ倍率と視野のイメージ



3.0X



4.0X



5.0X



5.8X



7.2X

PMルーペ仕様

重さ (g)

| 倍率 | 作業距離 (mm) (調整可能範囲) | 視野直径 (mm) | 焦点深度 (mm) | ルーペ・フレーム共 | | ルーペのみ |
|------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|-----|-------|
| | | | | フリップアップ | TTL | |
| 3.0X | 380~550 | 70~90 | 100 | 60 | 52 | 22 |
| 4.0X | 380~550 | 65~80 | 60 | 61 | 53 | 23 |
| 5.0X | 380~550 | 55~70 | 60 | 61 | 53 | 23 |
| 5.8X | 380~550 | 55~70 | 40 | 63 | 55 | 25 |
| 7.2X | 380~500 | 45~60 | 40 | 63 | 55 | 25 |

ワイナビュー® PMフレーム

フレームの特長

- ・ ルーペ用に設計されたチタンフレームです。
- ・ 軽量でフィット感に優れています。

PMフレーム / フリップアップ

PMフレーム / TTL

| | | |
|---|-----------|---------------------------------|
| ルーペの煽り角の微調整が可能 | 煽り角度 | ルーペはシールド(レンズ)に固定で不可 |
| ホルダーの位置で42~70mmまでPDの調整可能 (シールドはそれぞれのPDに合わせて用意) | 瞳孔距離 (PD) | 術者のPDに合わせてルーペホルダーをレンズに固定 |
| ノーズパッドの穴の位置と専用ヒンジで 高さ調整が可能 | ルーペ高さ位置調整 | ノーズパッドの穴の位置でルーペの 高さ調整が3段階で可能 |



| | |
|---------|----------------------------|
| YNV-PMB | PMフレーム / PMルーペ フリップアップ用セット |
|---------|----------------------------|

| | |
|---------|------------------------|
| YNV-PMH | PMフレーム / PMルーペ TTL用セット |
|---------|------------------------|

| | セット内容 | |
|----------|---------------------------------------|--|
| YNV-PM-F | PMフレーム本体(フレームのみ) ライト用スライド受付 | |
| YNV-PMH | PMルーペフリップアップ ルーペホルダー | |
| YVU-NS | ソフト スタンダードパッド | |
| AP-7099 | サポートコード (コード止め付き) | |
| YNA-T-C | ルーペ単体用ケース 外寸 : 170 x 130 x 69 (mm) | |
| AP-9136 | レンズクロス | |
| KM-0.79 | 六角ドライバー 0.71mm | |
| YNA-HD | ドライバー (+/- / 六角0.89・1.27) | |

| | セット内容 | |
|----------|---------------------------------------|--|
| YNV-PM-F | PMフレーム本体(フレームのみ) ライト用スライド受付 | |
| PM-TTL | PMフレーム用TTL PMルーペホルダー付レンズ (PD指定) | |
| YVU-NS | ソフト スタンダードパッド | |
| AP-7099 | サポートコード (コード止め付き) | |
| YNA-T-C | ルーペ単体用ケース 外寸 : 170 x 130 x 69 (mm) | |
| AP-9136 | レンズクロス | |
| KM-0.79 | 六角ドライバー 0.71mm | |
| YNA-HD | ドライバー (+/- / 六角0.89・1.27) | |

シールド・矯正レンズ (オプション)

| | | |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| YNV-B-SH | フリップアップ用 シールド 穴空き | <input type="checkbox"/> |
| YNV-B-S | フリップアップ用 シールド | <input type="checkbox"/> |
| PM-B-LH | フリップアップ用矯正レンズ 穴空き (処方箋に基づく) | <input type="checkbox"/> |
| PM-B-L | フリップアップ用矯正レンズ (処方箋に基づく) | <input type="checkbox"/> |

矯正レンズ (オプション)

| | | |
|--------|----------------------------|--------------------------|
| PM-T-L | 矯正レンズルーペホルダー付 (処方箋に基づく) | <input type="checkbox"/> |
|--------|----------------------------|--------------------------|

(注 : 穴を空け、ルーペがより眼に近づき、広視野を確保します。)

フレームカラー (5色)



コードレス LEDライト マエストロ



- 軽量・高輝度のコードレスLEDライト (31g)
- 照明光は演色性が高く、自然光に近い見え方を実現 (CRI 90+)
- 照明スポットの高い照度均一性、むらのない照明が可能に
- バッテリーの着脱が簡単なワンステップマグネット式
- PMルーペとLEDライト購入時にはアダプターが付属

| 主な仕様 | | | |
|------------------|-----------|------------------|------------------|
| スポットサイズ | (距離35cm時) | Φ82mm | |
| 照度・3段切替 | | 4,800 lux・ステップ1 | 10,000 lux・ステップ2 |
| 連続使用時間 | | 約3.5時間 | 約2時間 |
| 電源 | | リチウムイオンポリマーバッテリー | |
| LEDの演色性 | | CRI 90以上 | |
| 充電時間 | | 1時間40分 | |
| バッテリー寿命 | | 約500回 | |
| バッテリー重量/大きさ (mm) | | 17g/50 X 28 X 15 | |
| LEDライト重量 | | 14g | |

| MODEL | 商品名 |
|-------|------------------|
| KM-I | マエストロ LEDライト セット |

セット内容

| | | |
|--------|------------------------------------|--|
| KM-LED | LEDライト | |
| KM-B | 充電式バッテリーパック (セットには3個付属) | |
| KM-BC | 充電用クレードル (電源アダプター・電源ケーブル付) 2個同時充電可 | |
| KM-F | UVキュアリングフィルター (コンポジットフィルター) | |
| KM-CA | 専用ケース | |
| KM-S | ⊕ドライバー | |
| KM-LS | レンズクロス | |

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがあります。

届出番号：13B1X00268000183 (ワイナビューフレーム)
13B1X00268000187 (コードレスLEDライト マエストロ)

製造販売元



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル
TEL 03-3815-7787
FAX 03-5802-5931
URL www.keeler-yna.co.jp
E-mail eigyo-bu@keeler-yna.co.jp